

Инструкции за употреба

- Преди да затворите покритието на оксиметъра, поставете двете AAA батерии в специално изработеното за тях гнездо.
- Стиснете двете части на оксиметъра откъм отворения край, за да го разтвоорите.
- Поставете един от пръстите на пациента (за предпочитане показалеца) върху гумичката на образуващото се „легло“ вътре в устройството и пуснете устройството, за да прилепне плътно към пръста.
- По време на измерването, пръстът и тялото на пациента не трябва да се движат или треперят.
- Отчетете подадените резултати от измерването на дисплея.

!!Забележка! Почиствайте гумичката във вътрешността на оксиметъра само с медицински спирт. Препоръчително е почистването да се извършва преди всяка следваща употреба.

!!! Когато пръстът Ви е поставен в оксиметъра, нокътят Ви трябва да е нагоре!!!

! Диаграмата за пулса, изписваща се на дисплея, кореспондира с моментното състояние на пациентския пулс. Височината на кривата показва силата на пулса!

Акcesoари

1. Каишка 2. Две батерии 3. Инструкции

Инсталиране на батериите

- Поставете двете батерии в съответното отделение, като се съобразите с полярността.
- Натиснете повърхността на батериите хоризонтално по посока на стрелката.

Забележки:

- Батериите трябва да се инсталират в съответствие с поляритета. В противен случай може да се стигне до повреда на устройството.
- Моля, поставяйте или премествайте батериите в правилен ред. В противен случай може да се стигне до повреда на устройството.
- Ако оксиметърът няма да бъде използван дълго време, моля, извадете батериите.